

# curea-superimevät sidokset

## Tukemaan haavan luonnollista paranemista

### 1. Nopeuttaa haavan paranemista

- Tehokas haavaeritteen imukyky
- Imee myös verta
- Ei maseroi
- Suotuisat olosuhteet haavan paranemiselle

### 2. Allergiaystävällinen

- SuperCore ei sisällä liimaa tai sidosaineita

### 3. Lisää käyttömukavuutta


- Pintakuiva
- Vähentää hajua
- Eritteitä läpäisemätön taustakalvo
- Soveltuu kompression alle
- Harventaa sidosten vaihtotarvetta

### 4. Lisää turvallisuutta

- Lukitsee MRSA ja E. coli -bakteerit



Uusi  
pehmeämpi reuna!

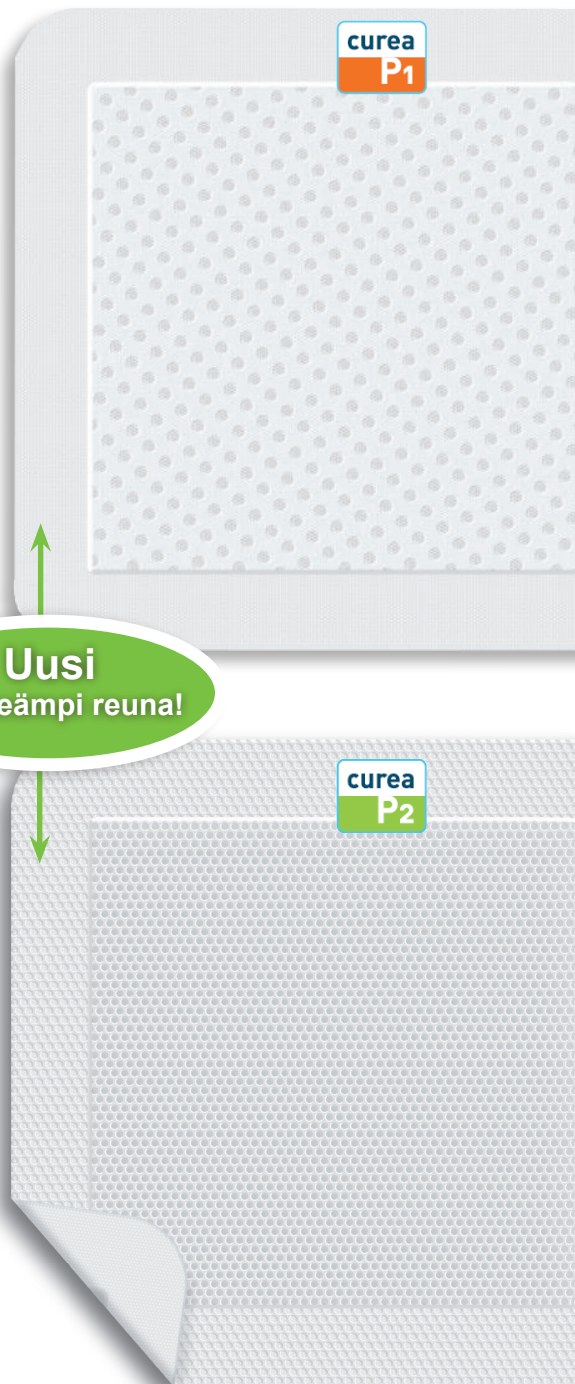

kun hoitotulokset ratkaisevat

**Steripolar**

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

## KÄYTTÖAIHEET

curea  
P1

### Haavan eritysvaihe

**curea P1** runsaasti imevä sidos on tarkoitettu kohtalaisesti tai runsaasti erittävien haavojen hoitoon. Voidaan käyttää myös kirurgisilla haavoilla ensisijaisena sidoksena. **Saatavilla myös kiinnittyvänä ja dreenisidoksena sekä aktiivihillisidoksena.**

curea  
P2

### Granulaatiovaihe

**curea P2** ei tartu haavaan polyeteleenipintamateriaalin ansiosta. Se tukee granulaatiokudoksen muodostumista sitä vahingoittamatta, mahdollistaen kivuttoman sidosten vaihdon. Soveltuu myös palovammojen ja ihonottokehtien hoitoon.

curea  
clean

**curea Clean** ja **curea Clean Breathable** ovat tehdaspuhtaita ja tarkoitettu käytettäväksi sekundäärisidoksena kohtalaisesti tai melko runsaasti erittävien haavojen hoitoon. **curea Clean Breathable -sidoksissa on puoliläpäisevä ja hengittävä taustakalvo.**

## KÄYTTÖOHJEET

- **SIDOKSIA EI SAA LEIKATA!**
- Curea-sidokset vaihdetaan haavan erityksen mukaan tai viimeistään 7 vrk välein
- Haavalle asettaminen:
  - **P1, P2** ja **curea Clean Breathable** aseta **tekstipuoli** haavasta poispäin
  - **P1 Duo Active** on molemmin puolisesti imukykyinen
    - A)** pahanhajuisille haavoille, joissa juokseva erite, laita valkoinen puoli haavaa vasten, vähentääksesi haavahajua.
    - B)** jos haava on infektoitunut, aseta tumma aktiivihillipuoli haavaa vasten. Hillitsee bakteerikasvua.
  - **curea Clean** aseta **sininen puoli** haavasta poispäin
- Soveltuvat käytettäväksi kaikkien haavanhoitotuotteiden kanssa, esim PolyWic ja Medihoney
- Sidosten kiinnittäminen
  - kalvolla reunoilta
  - kierresidoksella

**Uutuus!**

### curea P1 Duo active

Kaksitoiminen sidos, jossa toisella puolella curea P1, toisella aktiivihillikerros.


**curea P1**

**curea P2**

**Curea-sidoksen** kolmikierroksinen rakenne imee nesteen kapillaarisesti, lukiten eritteen sidoksen rakenteeseen ja jättäen pinnan kuivaksi.

**SuperCore** ei sisällä liima- tai sidosaineita vaan se on mekaanisesti puristettu, mikä parantaa imukykyä ja vähentää ihoärsytysriskiä.

## curea-sidoksen SuperCore® -ydin takaa imukyvyn

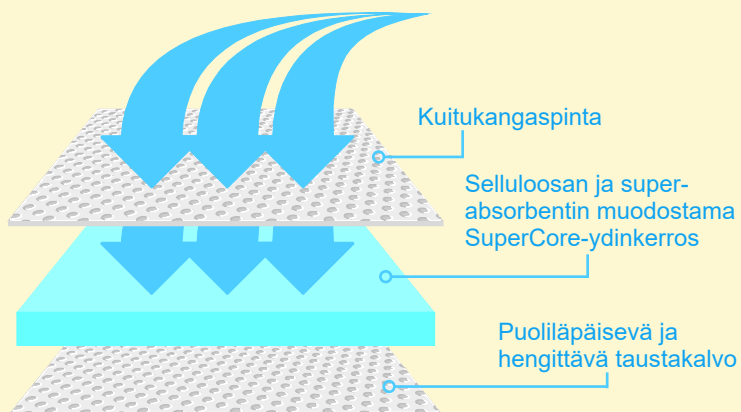

### curea P1 - kuitukangaspinta

koko	tuotenro	pakkauskoko	SAILAB
7,5 x 7,5 cm	P107507510	10	314699
10 x 10 cm	P110010010	10	314701
10 x 15 cm	P110015010	10	-
10 x 20 cm	P110020010	10	314703
10 x 30 cm	P110030010	10	314704
20 x 20 cm	P120020010	10	325382
20 x 30 cm	P120030010	10	314705
25 x 40 cm	P125040010	10	-
40 x 60 cm	P140060010	10	-

### curea P1 Drenisidos

koko	tuotenro	pakkauskoko	SAILAB
12 x 12 cm	P1100100D25	25	325016

### curea P1 Border -kiinnittyvä sidos

koko	tuotenro	pakkauskoko	SAILAB
16 x 16 cm	P1B16016010	10	-
15 x 25 cm	P1B15025010	10	-

### curea P1 Duo Active

koko	tuotenro	pakkauskoko	SAILAB
10 x 20 cm	C1DUO10020010	10	-

### curea P2 - polyetyleenipinta

koko	tuotenro	pakkauskoko	SAILAB
11 x 11 cm	P211011010	10	314701
10 x 20 cm	P210020010	10	314703
20 x 20 cm	P220020010	10	325382
20 x 30 cm	P220030010	10	314705

### curea Clean Breathable - kalvotausta

koko	tuotenro	pakkauskoko	SAILAB
10 x 10 cm	CCB10010080	80	-
10 x 20 cm	CCB10020040	40	-
20 x 20 cm	CCB20020020	20	-
20 x 30 cm	CCB20030020	20	-

### curea Clean - kuitukangastausta

koko	tuotenro	pakkauskoko	SAILAB
10 x 10 cm	CC100100100	100	314709
10 x 20 cm	CC10020050	50	314711
20 x 20 cm	CC20020025	25	326246
20 x 30 cm	CC20030025	25	-

**curea P1**

Border

**curea P1**

Dreeni



# Steripolar kuluttajaverkkokauppa

Kuluttajat voivat tilata tuotteitamme helposti ja nopeasti verkkokaupastamme. Tuotteet postiin tai kotiinkuljetuksena jopa muutamassa päivässä!

curea-sidokset löydät suoraan kuluttajaverkkokaupastamme osoitteesta [www.bit.ly/verkkokauppa-curea](http://www.bit.ly/verkkokauppa-curea)

## [www.steripolar.fi/verkkokauppa](http://www.steripolar.fi/verkkokauppa)



*kun hoitotulokset ratkaisevat*

**Steripolar**

Puh. 09 417 606 00

| [www.steripolar.fi](http://www.steripolar.fi)

| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004