

Medihoney™

Kliinisesti tutkittu lääkehunaja



Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon

Medihoney-haavanhoitotuotteet sisältävät **Manuka-hunajaa** (*Leptospermum sp.*), joka on standardoitua antibakteerista hunajaa. Medihoney-haavanhoitotuotteet tulevat maailman suurimmalta Manuka-hunajan tuottajalta, jolla on yli

15-vuoden kokemus kansainvälisestä tutkimustyöstä. Medihoneyn Manuka-hunajasiidokset olivat ensimmäiset lääketieteelliset hunajasiidokset, jotka kehitettiin erityisesti moderniin haavanhoitoon.

YKSI TUOTE, KOLME VAIKUTUSTAPAA

Haavan suojaaminen • Haavan puhdistaminen • Haavan parantaminen

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004


Medical Honey & Wound Gel Antibakteeriset ”tuubihunajat”

Medical Honey

Medical Honey sisältää 100% standardoitua ja patentoitua Manuka-hunajaa (pitoisuus 100%). Medical Honey on tarkoitettu erityisesti syvien haavojen hoitoon.

Wound Gel

Wound Gel -haavageeli sisältää 80% Manuka-hunajaa (pitoisuus 100%) sekä yhdistelmän luonnollisia vahoja ja öljyjä. Korkean viskositeetin omaava geeli on helppo levittää haavaan ja huuhdella pois sidosvaihtojen yhteydessä. Soveltuu erinomaisesti pinnallisille haavoille.

 **Tuubihunajat ovat uudelleensuljettavia ja ne säilyvät avattuina 4 kuukautta!**¹




Medihoney Geelidos Antibakteerinen hunajageelidos

Medihoney Geelidos sisältää 80% Manuka-hunajaa (pitoisuus 100%). Sidos muuttuu geelimäiseksi joutuesaan kosketuksiin haavaeritteen kanssa. Sidos on tarkoitettu vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille. Sidos leikataan haavan kokoiseksi.

Medihoney Alginaattisidos Antibakteerinen alginaattisidos

Medihoney Alginaattisidos on steriili haavasidos, joka koostuu 95% Manuka-hunajasta (pitoisuus 100%). Sidos sisältää myös kalsiumalginaattia, joka imee haavaeritteen itseensä. Sidos soveltuu erinomaisesti runsaasti erittäville haavoille. Sidos leikataan haavan kokoiseksi. Saatavilla Alginaattinauhana.



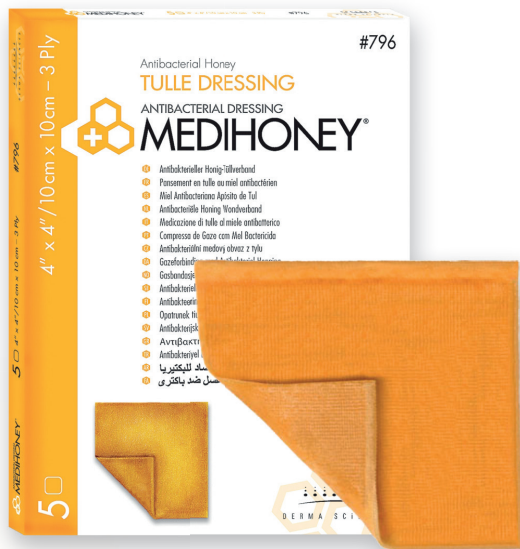

Medihoney Tulle -hunajaverkko Antibakteerinen hunajavoidesidos

Medihoney Tulle -hunajaverkko koostuu vahvasta, kudotusta antibakteeriseen Manuka-hunajaan kyllästetystä verkosta. Sidoksen hunajapitoisuus on 80%. Voidaan käyttää sekä syvissä että pinnallisissa haavoissa. Sidos asetetaan haavalle yksinkertaisena, taitettuna tai sykerönä ja sen tulee olla haavan kokoinen.

Medihoney Derma Cream -ihovoide Suojaa herkkää ihoa

Medihoney Derma Cream -ihovoide auttaa ylläpitämään ihon suojaominaisuudet ja säilyttämään ihon kosteuden. Voidaan käyttää mm. iohalkeamiin, hyönteisten puremiin ja auringonpolttamiin.

Voide sisältää 30% antibakteerista Manuka-hunajaa. 70% voiteesta koostuu mm. öljyistä, Aloe Verasta, E-vitamiinista ja kamomilla-sauniouutteesta.



Medihoney Barrier Cream -suojavaoide Suojaa ihoa kosteudelta

Medihoney Barrier Cream -suojavaoiteen silikoni luo iholle kalvon, joka suojaa sitä eritteiltä ja kosteudelta säilyttäen kuitenkin ihon oman kosteuden. Voidaan käyttää haavaa ja avannetta ympäröivällä iholla ja inkontinenssialueilla.

Suojavaoide sisältää 30% antibakteerista Manuka-hunajaa. 70% voiteesta koostuu silikonista, kookosöljyistä, Aloe Verasta, E-vitamiinista, kamomilla-sauniouutteesta ja iltahelokkiöljyistä.

Kliinisesti tutkittu lääkehunaja



Tutkimustulokset osoittavat, että Medihoney

- sidokset nopeuttavat kroonisten haavojen parantumista 30% enemmän kuin perinteiset hoidot²
- auttaa vähentämään infektioita leikkauks-toimenpiteissä³
- parantaa potilastyytyväisyyttä⁴
- vähentää haavakipua⁴

Medihoney-tuotteiden sisältämän Manuka-hunajan MGO-pitoisuus on 500, UMF-pitoisuus 12+.

Tilaustiedot

tuotenro	tuotekuvaus	pakkauskoko
391	Medihoney Wound Gel 10g	20
395	Medihoney Wound Gel 20g	5
398	Medihoney Medical Honey 20g	5
798	Medihoney Geelidos 5cm x 5cm	10
799	Medihoney Geelidos 10cm x 10cm	10
795	Medihoney Alginaattisidos 10 x 10 cm	5
793	Medihoney Alginaattisidosnauha 2 x 30 cm	5
796	Medihoney Tulle hunajaverkko 10 x 10 cm (avattuna 10 x 30 cm)	5
582	Medihoney Barrier Cream -suojavaide 50g	1
800	Medihoney Barrier Cream -suojavaide 2g	20
597	Medihoney Derma Cream -ihovoide 50g	1

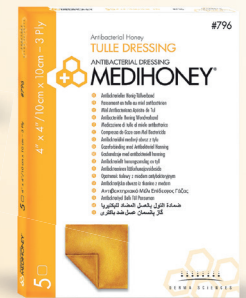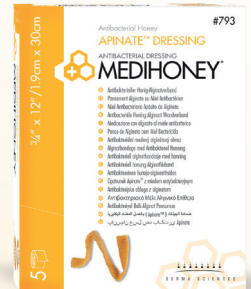

1. Biotest Laboratories PTY.LTD. (2006) Open shelf life study results on Medihoney
2. Robson V. et al (2009) "Standardised antibacterial honey (Medihoney™) with standard therapy in wound care: randomised clinical trial" Journal of Advanced Nursing. Vol 65 (issue 3) pg 565-575
3. Johnson, D.W. et al (2005) Randomised, controlled trial of topical exit-site application of honey (Medihoney™) versus Mupirocin of the prevention of catheter-associated infections in hemodialysis. Journal of American Society of Nephrology. 16 (5): 1456-62
4. Dunford, C. and Hanano, R. (2004) Acceptability to patients of a honey dressing for non-healing venous leg ulcers. Journal of Wound Care 13. (5): 193-197

kun hoitotulokset ratkaisevat