


Attends® Soft



Pukemishohje



1 Valitse suojan imukyky käyttäjän tarpeiden mukaan.

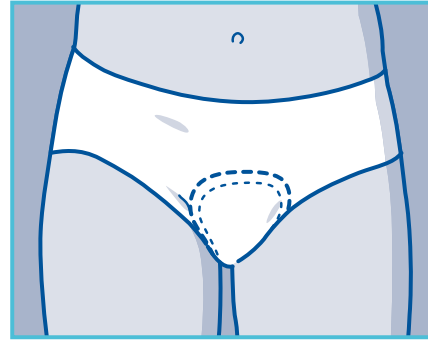

2 Kiinnitä suoja alusvaatteisiin. Ihonmyötäisesti istuvien alusvaatteiden käyttö on suositeltavaa optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi. Varmista, ettei teippipinta ole kiinni ihossa.

Neuvoja ja vinkkejä

Tuotevalikoima

- Valitse suojan imukyky käyttäjän tarpeiden mukaan.
- Jotta suoja toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme sitä käytettäväksi ihonmyötäisten alusvaatteiden kanssa.
- Mitä pienempi suoja valitaan, sitä miellyttävämpää ja huomaamattomampaa sen käyttäminen on.

Hävittäminen

- Rullaa suoja ja käsittele toimipisteesi kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Voit käyttää Attends Soft 1-3+ - tuotteiden yksittäispakkauskäärettä heittäessäsi käytetyn suojan pois.
- Älä vedä suojaa vessasta.



Attends Soft -suojat on proDERM-testattu dermatologisen tutkimusinstituutin toimesta.

Lisätietoja saadaksenne, vieraillkaa sivuillamme www.attends.fi