


Dale-abdominaalituki

Käyttöohjeet

Pukemisohje

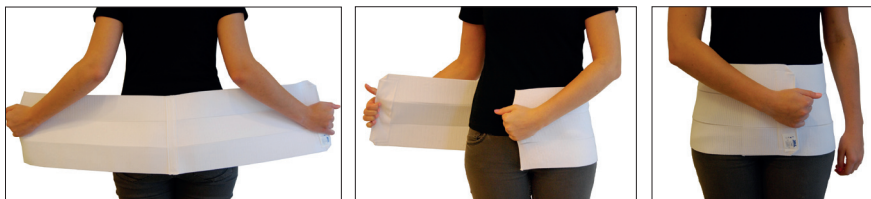

1. Aseta tuki siten, että sen keskisauma on selkärangan kohdalla. Tuen yläreunan tulee olla juuri navan alapuolella. Venytä tukea ulospäin.
2. Vedä tuen vasen reuna kohti vartalon keskiosaa.
3. Kiinnitä tuki sen Velcro-tarrakiinnityksellä.

Pesuohteet



Konepesu - korkeintaan 30° asteessa



Kloorivalkaisu kielletty



Käsipesu



Ripustuskuivaus

Huom! Aseta tarrakiinnitys paikoilleen ennen pesua tarran nukkaantumisen estämiseksi.

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar